




Hyfrecator® 2000 Système pour électrochirurgie

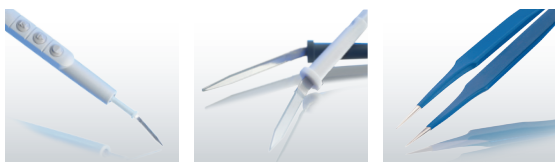

ELECTROLASE®
EXTREMITÉ POINTUE



HYFRECATOR®
GAINÉ



ELECTRODE
TYPE AIGUILLE



ELECTRODE
TYPE BOULE



Pour plus d'informations
sur ces produits ainsi que sur
nos autres produits innovants,
rendez-vous sur notre site :
ConMed.com.

Depuis plus de 75 ans, l'Hyfrecator® demeure le premier choix des praticiens lors de la pratique de l'électrochirurgie en clinique ou en cabinet.

HYFRECATOR® 2000
UNITE POUR
ELECTROCHIRURGIE

Der Hyfrecator® est un générateur d'électrochirurgie multi-fonction, pouvant opérer en mode monopolaire ou bipolaire et équipé de fonctions d'auto-diagnostic et de rappel des derniers paramètres de programmation électrique utilisés. Lors de son installation initiale, il est facilement utilisable par les praticiens, qui peuvent ainsi entreprendre une thérapie tissulaire précise, et bénéficier ainsi d'années de fonctionnement sûr et fiable.

Il n'existe qu'un seul Hyfrecator®

Sortie haute tension pour les procédures de dessiccation et par fulguration lourdes nécessitant une forte intensité.

Sortie basse tension pour les procédures de dessiccation et par fulguration légères nécessitant une faible intensité et plus de précision.

Les sorties indépendantes permettent de produire deux effets thérapeutiques différents, offrant ainsi un meilleur contrôle des résultats cliniques attendus. En basse tension, sa régulation souple se fait par 1/10 de watt. En haute tension, il produit des arcs électriques plus longs et plus larges.

Il est équipé de deux micro-processeurs. Le premier micro-processeur contrôle la tension et la fonctionnalité de l'unité pendant que le second contrôle l'unité et interrompt l'activation s'il détecte un danger pour la sécurité. La fourniture du courant est donc régulée, tout en garantissant la sécurité du fonctionnement.







Hyfrecator® – Caractéristiques

Profondeur :	102 mm
Largeur :	222 mm
Hauteur :	190 mm
Poids :	2,7 kg
Puissance de sortie :	Basse tension de 0 à 20 watts (par incrément de 1/10 watt jusqu'à 10 watts)
Tension :	0 à 35 watts
Bipolaire :	0 à 35 watts

HYFRECTOR® 2000
UNITE POUR
ELECTROCHIRURGIE

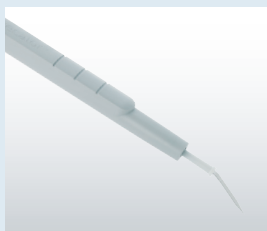

POIGNEE AVEC
PEDALE DE CONTRÔLE

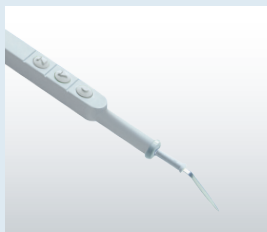

POIGNEE AVEC
CONTRÔLE MANUEL



GAINES STÉRILE

Poignées autoclavables

L'Hyfrecator® peut être activé par contrôle manuel ou grâce à une pédale. Chaque Hyfrecator® 2000 est fourni avec une poignée de contrôle manuel réutilisable et autoclavable (réf. 7-900-5), avec boutons de régulation de la puissance directement sur la poignée. L'utilisateur peut ainsi rapidement réguler la puissance de sortie sur le champ, afin d'atteindre l'effet chirurgical souhaité. Toutes les poignées sont conçues avec un embout hexagonal non tournant, afin de verrouiller le bistouri en toute sécurité et en multi-position. Le cordon de la poignée est souple et résistant afin de réduire la fatigue de la main lors de son utilisation ainsi que son raccordement aisé à l'unité.

Conserver une procédure stérile

Grâce à la gaine

La gaine stérile est un moyen pratique et économique permettant de conserver un champ stérile lors de l'utilisation des poignées d'électrochirurgie réutilisables de l'Hyfrecator. La gaine s'adapte sur les instruments de l'Hyfrecator ou tout autre instrument manuel. La longueur supplémentaire de la gaine permet de laisser l'instrument dans le champ stérile. Une gaine non stérile est aussi disponible.

L'utilisation de gaines accroît la longévité de la poignée, réduit le temps d'échange entre chaque patient, et réduit le risque d'exposition de la poignée aux agents contaminants.

Description	Cond.	Référence
Poignée à contrôle manuel, Autoclavable, Réutilisable	Unité	7-900-5
Poignée contrôlée par pédale, Autoclavable, Réutilisable	Unité	7-900-6
Gaine pour poignée – Non stérile	100 / boîte	7-796-18BX
Gaine pour poignée – Stérile	25 / boîte	7-796-19BX

Précision de pointe

Grâce aux électrodes Electrolase®

Les électrodes Electrolase® ConMed à usage unique pour Hyfrecator sont disponibles soit en version extrémité émoussée ou soit en version extrémité pointue. Les Electrolase® à extrémité pointue sont idéales pour les procédures nécessitant une précision et un contrôle exceptionnels, alors que les extrémités émoussées sont idéales pour la coagulation de zone étendue.

Sûres et pratiques

Les électrodes Electrolase® à usage unique éliminent le risque de contamination croisée entre patients et leur embout de sécurité en plastique simplifie leur manipulation, tout en prévenant les blessures accidentelles. Les extrémités mousse et pointe sont codées par couleur pour une identification rapide. Les électrodes mousse sont gris foncé et les électrodes pointues sont blanches.


Description	Cond.	Référence
Electrodes à usage unique		
Electrolase Ext. pointue / Non-stérile	100 / boîte	7-100-12BX
Electrolase Ext. pointue / Stérile	50 / boîte	7-100-8BX
Electrolase Ext. mousse / Non- stérile	100 / boîte	7-101-12BX
Electrolase Ext. mousse / Stérile	50 / boîte	7-101-8BX

Electrodes réutilisables

Afin de permettre l'application de l'Hyfrecator à une variété d'utilisations chirurgicales, ConMed propose un large choix de tailles et de formes d'électrodes réutilisables, répondant ainsi à la diversité des zones de traitement.

Description	Cond.	Référence
Electrodes réutilisables		
Electrode générale	1	711B
Electrode Aiguille extra-fine	6 / boîte	714
Electrode Aiguille extra-fine	6 / boîte	714-S
Aiguille fine	1	705A
Aiguille de dessiccation longue	1	716
Aiguille de dessiccation courte	1	7-221-S
Electrode Aiguille courbe	1	7-221-A
Electrode Aiguille	5 / boîte	138004
Electrode angulée à boule	1	7-222-A
Electrode à grande boule	1	7-222-L
Electrode à petite boule	5 / boîte	138019
Kit de démarrage d'électrodes réutilisables	5 / boîte	700

HYFRECATOR® 2000
UNITE POUR
ELECTROCHIRURGIE

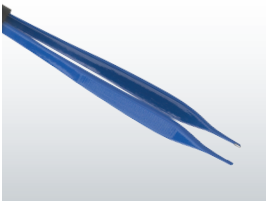

MORS LISSE ADSON

Pinces Bipolaires

Comme tout générateur d'électrochirurgie multi-fonction, l'Hyfrecator® 2000 dispose du mode bipolaire similaire à celui des unités plus importantes.

Les pinces bipolaires sont conçues pour saisir, manipuler et coaguler le tissu choisi. Le courant électrique passe alternativement d'une extrémité à l'autre, réduisant ainsi la distance parcourue par le courant et produisant un effet thérapeutique précis et contrôlé.

Description	Cond.	Référence
Pinces		
Mors Micro Bijoutier	1	7-809-1
Mors Micro Gerald	1	7-809-2
Mors Micro Hardy, Baïonnette	1	7-809-3
Mors lisse Adson	1	7-809-4
Mors lisse Cushing	1	7-809-5
Mors lisse Cushing, Baïonnette	1	7-809-6
Mors dentelé Adson	1	7-809-7
Mors dentelé Cushing	1	7-809-8
Mors dentelé Cushing, Baïonnette	1	7-809-9
Cordon bipolaire	1	7-809-12
Pédale	1	7-900-4



Flexibilité maximum : support mobile

Lorsque chaque salle de soins ne peut pas disposer d'un Hyfrecator, le support mobile et télescopique de l'Hyfrecator assure la flexibilité et la facilité de déplacement de l'Hyfrecator d'une pièce à l'autre. Vous n'avez qu'à le fixer dessus et le déplacer.

HYFRECATOR® 2000
UNITE POUR
ELECTROCHIRURGIE

Description	Cond.	Référence
Support Mobile et Télescopique Hyfrecator	1	7-900-1
Accessoires		
Plaque Patient	1	7-900-7
Nettoyant pour extrémité électrochirurgicale	40 / boîte	138029



Hyfrecator® 2000

Système pour électrochirurgie

525 French Road
Utica, NY 13502, USA

Service clients : 1-800-448-6506
Contact International : +1-315-797-8375
Fax : 1-800-438-3051

ConMed.com
Hyfrecator.com
info@mail.conmed.com